

初めての人も簡単に使える「チャームなめらかスリムタンポン」

タンポンで いつもと同じ笑顔の私




初めての人はコレ

生理中、モレの心配から仕事に集中できなかったり、習い事やデートの予定をキャンセルしたりという経験はありませんか？モレの不安を軽減し、毎日を笑顔で過ごしたいと思ったら、やっぱりタンポン。

生理中、モレの心配から仕事に集中できなかったり、習い事やデートの予定をキャンセルしたりという経験はありませんか？モレの不安を軽減し、毎日を笑顔で過ごしたいと思ったら、やっぱりタンポン。ユニ・チャーム調べによると、ナプキンのモレを100とした場合、タンポンは20程度とモレ率が5分の1※。

モレ率はナプキンの5分の1※
上手に使用すれば生理中でも軽快

モレの不安を軽減し、快適な毎日をサポートしてくれるタンポン。正しく知れば、誰にでも簡単に使いこなせるものです。“使い方が難しそう”と感じている人は、まずタンポンの正しい知識を得てから、ビギナーにやさしい「チャームなめらかスリムタンポン」でスタートしてね。

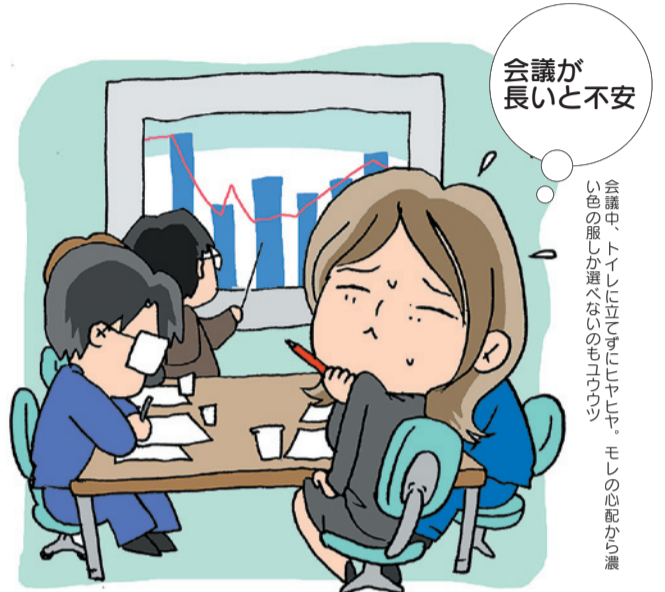

会議中、トイレに立てずに「チャーム」の色の服しか選べないのもイヤイヤ。モレの心配から

Q ヒモが切れたりしない？

A 切れない工夫が施されています

タンポンのヒモは、何本もの糸をより合わせて丈夫に作られています。しかも、吸収体にしっかり取り付けられており、3kgのおもりをぶら下げても平気。体内からタンポンを抜くときにかかる力は0.7~1.0kg (ユニ・チャーム調べ) なので、引っ張ってもヒモが抜けたり切れたりすることはありません。念のため、使用前には説明書をよく読み、ヒモが切れないこと、抜けなことをチェックしてね。

Q 衛生面が心配だけど…

A 個包装後、滅菌処理されています

タンポンは一本ずつ個包装をしてから滅菌処理をしているので衛生的です。吸収体の外側はソフトシート(不織布)でくるまれているため、体内に繊維が残ることもありません。使用のときは手や指を清潔にし、むやみにタンポンに触らないことも大切です。



疑問が解消できたら早速チャレンジ

タンポンを使えば、生理中であることを忘れてしまうほど。淡い色や白い服でさわやかにキメたいこれらの季節も思いっきりおしゃべりが楽しめるね

Q 初めてでもうまく使える？

A 最初はビギナー向けタンポンで

「チャームなめらかスリムタンポン」のアプリケーションは、抵抗のないスリムな形状。スルッとスムーズに挿入できるように設計されているから、ビギナーでも簡単に使いこなせます。経血量が多い日に試せば、さらに挿入しやすくなりますよ。

「チャームなめらかスリムタンポン」の製品説明



アプリケーション
吸収体を正しい位置にナビゲートするもの。挿入時に使うだけで、そのまま体内に残しておくわけではありません

挿入の目安
ここまで体内に入れます

持つところ

押すところ

吸収体
体内で経血を吸収するもの。大きさは直径約10mm

ヒモ
取り出すときに引っ張ります

実際の製品は、アプリケーションの中へ吸収体がセットされています

Q 体の奥に入り過ぎることはないの？


A 子宮の入口は直径約2~3mm

子宮は、タンポンを入れる位置よりもずっと奥にあり、入り口の直径は約2~3mm。直径約10mmのタンポンは入りません。※出産後半年以内の人は、子宮口が開放している場合があるので、挿入の目安より奥へ入れないでください

Q 痛くないの？

A 正しい位置に挿入すれば違和感なく使えます

体の奥にある“無感覚ゾーン”に正しくセットすれば、タンポンは痛みや違和感がなく使えるものです。挿入後に違和感があるのは、正しい位置まで入っていないということ。「チャームなめらかスリムタンポン」は、アプリケーションが正しい位置まで導く長さだから無理なくカンタンにセットできます。

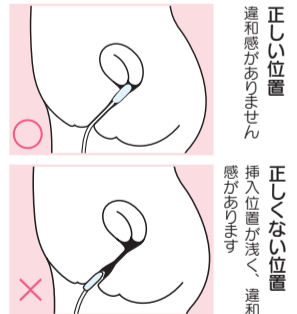

正しい位置 違和感がありません
正しい位置 挿入位置が浅く違和感があります

ビギナーの疑問に答えます タンポンQ&A

タンポンのメリットは理解しても、チャレンジする前はちよっぴりの不安もあるよね。まずは、疑問を解消して正しく理解することからスタート！

使い方

- 1 アプリケーターごと腔内へ挿入し、アプリケーションの先端を押し下す
- 2 吸収体がアプリケーションから抜け出て正しい位置にセットされます。あとはアプリケーションを体内から抜き取れば挿入が完了。取り出すときは、体外に出ているヒモを引っ張るだけ。簡単でしょ？

そもそもタンポンってどんなもの？

A 体内に挿入した吸収体で経血をキャッチします

小さな吸収体を腔内に入れ、体外に出る前の経血をダイレクトに吸収するのがタンポン。「チャームなめらかスリムタンポン」には、やさしく挿入できる形状のアプリケーションがついています。

▶使用上の注意 商品に添付されている説明書にはTSSという疾病に関する重要な情報が含まれています。使用前に必ず読んで保存してください。タンポンは連続使用しないで、ナプキンと交互に使用してください。1回の使用は8時間を超えないでください。タンポンは、説明書どおりに使えば、月経中もより快適に過ごせますが、ごくまれにトキシックショック症候群(TSS)という症状があらわれます。突然の高熱、発疹(はっしん)・発赤、けん怠感、嘔吐(おうと)、下痢などの症状があらわれた場合は、タンポンの使用を中止し、説明書を持って産婦人科などの専門医に相談してください。タンポンは医療用器具です。
※バンティライナーと一緒に使うとさらに快適に過ごせます

商品に関する問い合わせ
ユニ・チャーム お客様相談ダイヤル
0120(423)001
受付時間 午前9時30分~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
<http://www.unicharm.co.jp/>

Campaign

うれしい2つのキャンペーン実施中

今なら厳選エステなどに使える「JTBギフト券」が当たるキャンペーン、「1万名様！なめらかスリム体感キャンペーン」を実施中です。各キャンペーンの詳細内容は、下記ホームページで確認を。ホームページには、タンポンに関する役立つ情報も満載。ぜひアクセスしてね。

パソコンまたはケータイで
<http://www.unicharm.co.jp/>

二次元バーコード対応のケータイならここからアクセス

慣れてきたらこちら

タンポンの使用に慣れてきたら、経血量に合わせて製品を使い分けてね。

アプリケーション付きタンポン「チャームソフトタンポン レギュラー」10個入り。「スーパー」「量の少ない時用」もあります